

 VeterLent

lentes de contacto terapéuticas · bandage contact lens



uso veterinario · veterinary use



Gama NH-VET

Lentes NH-VET

Las lentes NH-Vet® son lentes terapéuticas de uso veterinario.

Las lentes **NH-Vet®** se fabrican de forma individual con material de hidrogel de Silicona, utilizando los mas modernos tornos de precisión nanométrica para su tallado. Las lentes NH-Vet® son lentes esféricas – progresivas, que permiten una fácil oxigenación y un mayor confort del paciente.

Las lentes **NH-Vet®** poseen un espesor central que permite una correcta manipulación



Características técnicas

Clasificación: FILCON V4
Transmisión óptica: 98.5 %
Permeabilidad al oxígeno: 120 DK
Índice de refracción: 1.51
Contenido de agua: 75 %
Filtro UV
No-Iónico

Clínica

Indicaciones

- Pequeñas perforaciones corneales
- Antes y después de la operación
- Abrusiones y erosiones epiteliales
- Queratitis
- Quemaduras químicas
- Ojo seco con la producción normal de lágrimas
- La liberación del fármaco


Contraindicaciones

- Queratoconjuntivitis seca (KCS)
- infección bacterial
- Aplicación de gotas de corticosteroides

Cómo utilizar las lentes

Inserción de la lente

- Para dar apoyo a la lente, utilice los dedos pulgar, índice y corazón (y quizás el anular).
- Presione los lados del párpado inferior levemente, empujando el párpado desde fuera hacia dentro y suavemente deslice el borde de la lente por debajo del párpado inferior.
- Mantenga la lente en esa posición y repita la operación en el párpado superior.
- Ubique la lente en el ojo. En este momento, el párpado se deslizará sobre la parte inferior del borde de la lente, la lente se colocará.
- Asegúrese de que el tercer párpado quede por encima de la lente.

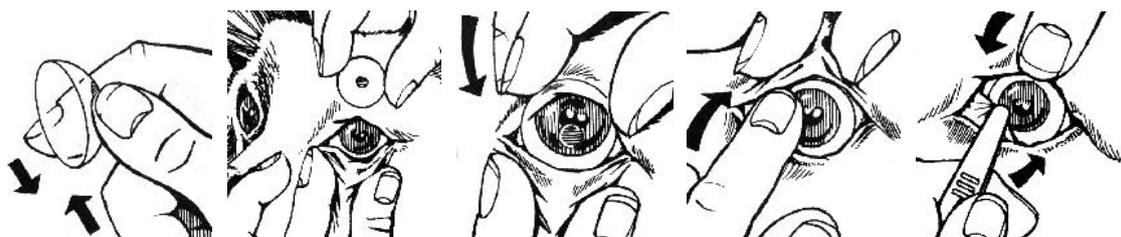

Retirar la lente

- Sostenga los párpados.
- Con el dedo índice toque la lente y desplácela hacia la parte inferior del ojo.
- Ahora con el pulgar e índice pellizque la lente y quítelo suavemente

Duración y mantenimiento

Duración de las lentes

Las lentes **NH-VET** gracias a su alto contenido en agua y su permeabilidad al oxígeno más elevado del mercado permiten que se puedan llevar de 2 a 4 semanas. Siempre bajo supervisión, para evitar que la mascota pueda intentar retirarla.

Limpieza de la lente

Después de retirar las lentes deben limpiarse con un agente de limpieza de lentes de contacto. Antes de volver a colocarla, la lente debe ser enjuagado con una solución salina.

Modelos y presentación

NH-Vet FEL (Gatos)




Size	Base curva	Diámetro	Recomendación
S	8.30 mm	14.00 mm	Gatos pequeños
SM	8.50 mm	15.50 mm	Gatos jóvenes
M	8.80 mm	16.00 mm	Gatos domésticos
L	9.20 mm	16.00 mm	Gatos grandes
XL	9.40 mm	18.00 mm	Gatos Persas – Ojos grandes

NH-Vet CAN (Perros)



Size	Base curva	Diámetro	Recomendación
S	8.50 mm	15.50 mm	Perros pequeños
SM	9.60 mm	18.00 mm	Perros medianos -pequeños
M	9.80 mm	18.00 mm	Perros medianos
ML	10.00 mm	18.00 mm	Perros medianos grandes
L	10.40 mm	20.00 mm	Perros grandes
XL	10.80 mm	20.00 mm	Perros muy grandes

Las lentes se comercializan en envases unitarios, estériles, listas para su uso.

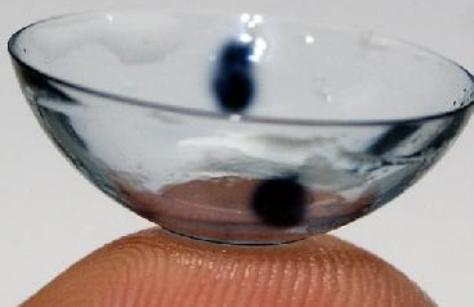

Comercializado por:

Euroklee, S.L.
Camí de Can Calders 10, 1ro 1ra
08173 Sant Cugat Del Vallès
Barcelona - España
Tel: +34 935 800 281

Fabricado por:

Nohalent, S.L.
Ramal De Hoyos 7 Local 53
29620 Torremolinos
Málaga - España